

INSTRUÇÃO DE USO ESTOJO AUTOCLAVAVEL PARA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS IMPLANFIX

Visando a praticidade e a facilidade de ter acesso às informações contidas nas Instruções de Uso de nossos produtos, a Implanfix Materiais Cirúrgicos Ltda em acordo com a IN nº 4/2012 estabelecida pela ANVISA, disponibiliza os documentos para download no site: http://www.implanfix.com.br/instrucao_uso. Importante: Verifique a versão da Instrução de Uso indicado no rótulo do produto, juntamente com o nº do cadastro ANVISA e clique em "Baixar" no documento desejado para iniciar a transferência do arquivo. Para obter a Instrução de Uso impressa sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone +55 (11) 2368-5488 ou pelo e-mail comercial@implanfix.com.br.

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

O Estojo Autoclavável para Esterilização de Instrumentais - Implanfix foi especialmente projetado para acomodar instrumentais durante o procedimento de esterilização, armazenamento e transporte destes, sendo composto por; Caixa Autoclavável, Bandeja Autoclavável, Bandeja Usinada Autoclavável e Tampa Autoclavável.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

O Estojo Autoclavável para Esterilização de Instrumentais - Implanfix foi especialmente projetado para acomodar instrumentais durante o procedimento de esterilização, armazenamento e transporte destes, sendo composto por; Caixa Autoclavável, Bandeja Autoclavável, Bandeja Usinada Autoclavável e Tampa Autoclavável é apresentado em plástico bolha, transparente e posteriormente será acondicionado em caixas de papelão com todas as informações necessárias ao produto.

FUNDAMENTOS DE SEU FUNCIONAMENTO E SUA AÇÃO:

O Estojo Autoclavável para Esterilização de Instrumentais – Implanfix possui tamanhos variados para melhor atender as necessidades dos profissionais. Não apresentam cantos vivos facilitando a higienização e limpeza. Favorece uma esterilização eficaz por possuir cavidades que permitem melhor circulação do ar. Possui um exclusivo tratamento, que permite maior segurança.

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO / CONSERVAÇÃO / MANIPULAÇÃO:

O local de armazenamento do Estojo Autoclavável para Esterilização deve estar limpo e seco, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos de forma a manter as condições ideais de armazenamento e transporte, assim como, a sua integridade física e química. O transportador deve ser informado sobre o conteúdo. Os cuidados a serem tomados no transporte estão demonstrados na embalagem, assegurando assim, proteção do Estojo Autoclavável para Esterilização desde a expedição até a entrega ao cliente. As condições especiais para armazenamento, manipulação e conservação dos Estojos Autoclaváveis para Esterilização devem ser seguidas com o intuito de assegurar que os mesmos permaneçam livres de danos, avarias, sujidades ou resíduo contaminante.

INSTRUÇÃO DE USO ESTOJO AUTOCLAVÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS IMPLANFIX

ESCLARECIMENTO SOBRE O USO DO PRODUTO: O manuseio do Estojo Autoclavável para Esterilização de Instrumentais - Implanfix deve ser realizado somente por profissionais da área médico-hospitalar, devidamente especializados e familiarizados com as técnicas e procedimentos que envolvem seu uso; Para abrir os estojos autoclaváveis para esterilização de instrumentais Implanfix, devem-se desativar as travas laterais com a ajuda do dedo polegar e indicador de cada mão simultaneamente; O Estojo Autoclavável para Esterilização de Instrumentais - Implanfix deve ser manipulado cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas. Caso o produto tenha caído, ou sido inadequadamente manuseado, ou suspeito de ter sofrido dano, deve ser separado e encaminhado ao Fabricante. O uso incorreto e por pessoas não capacitadas pode causar danos;

ADVERTÊNCIAS:

Produto Não Estéril. Esterilizar em Auto Clave Hospitalar antes do uso, de acordo com o procedimento padrão adequado. **NÃO ENCOSTAR O ESTOJO AUTOCLAVÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS - IMPLANFIX NAS PAREDES INTERNAS DA AUTOCLAVE.**

PRECAUÇÕES DE USO / CUIDADOS ESPECIAIS:

- Prazo de vida útil depende dos cuidados tomados durante a utilização;
- Sucessivas utilizações e esterilizações provocam a fadiga do material e limitam a vida útil do mesmo;
- Verificar a condição do produto antes de cada uso e se necessário, adquira um novo se tiver observado fadiga excessiva ou risco de quebra;
- Consulte o seu distribuidor ou o próprio fabricante do Estojo Autoclavável para Esterilização de Instrumentais - Implanfix no caso de dúvidas sobre as condições apresentadas pelo produto.

RESTRIÇÕES DE USO:

Não apresenta. O Estojo Autoclavável para Esterilização de Instrumentais – Implanfix têm sido usados por muitos anos sem incidência de efeitos adversos reportados desde que verificadas as precauções, advertências, contra indicações e cuidados especiais.

CONTRA-INDICAÇÕES:

Não há contra indicações.

PROCEDIMENTOS ADEQUADOS PARA, LIMPEZA, DESCONTAMINAÇÃO, LAVAGEM, E ESTERILIZAÇÃO DO ESTOJO AUTOCLAVÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS - IMPLANFIX LIMPEZA

A remoção de matéria orgânica deve ser feita utilizando detergente enzimático (mínimo três enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Após lavar em água corrente e observar a presença de resíduos, repetir o processo, caso persista, remover através de limpeza manual.

DESINFECÇÃO

Utilizar solução de ácido peracético a 0,2% por 10 minutos.

INSTRUÇÃO DE USO ESTOJO AUTOCLAVAVEL PARA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS IMPLANFIX

ESTERILIZAÇÃO

Deverá ser feita através de autoclave, observando as instruções do fabricante da autoclave. Repetir o processo a cada uso.

Recomenda-se:

Ciclo: Gravitacional.

Temperatura: 134°C (273°F).

Tempo de exposição: 30 minutos.

ATENÇÃO: evitar contato com produtos químicos (solvente, hidrocarbonetos clorados), pois pode ressaltar em deterioração.

AVALIAÇÃO DO PRODUTO / INSPEÇÃO TÉCNICA:

Estojo Autoclavável para Esterilização de Instrumentais - Implanfix deve ser submetido a uma inspeção técnica, para garantir que seu funcionamento esteja apropriado, devendo tomar a ação corretiva de remover e repor o produto não conforme, isto é, que não apresente as condições de perfeito funcionamento, por outro com as mesmas características e de marca Implanfix.

RECLAMAÇÕES:

Caso o Estojo Autoclavável para Esterilização de Instrumentais - Implanfix apresente um risco imprevisível específico, esteja fora de suas especificações ou gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente o Serviço de Atendimento ao Cliente (S.A.C) da Implanfix, envie o produto limpo e embalado em saco plástico, devidamente identificado e com descrição da Não Conformidade, para Rua Itariri número 041 – Canindé – São Paulo – SP Cep: 03033-060. **S.A.C.PABX: +55 11 2368-5486 / +55 11 2368-5488 – e mail: implanfix@implanfix.com.br.**